

令和3年8月26日

大会参加者・関係者 各位

札幌スケート連盟
フィギュア委員長 高村邦子

第45回札幌フィギュアスケート選手権大会 兼 2021 SAPPORO CUP における 新型コロナウイルス抗原検査の実施について

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、今大会では感染対策の一環として、以下のとおり入館者全員に新型コロナウイルス抗原検査を実施致します。趣旨をご理解いただき、検査実施へのご協力をお願い致します。


1. 検査の流れ



- ・「検査受付」で検査キットをお渡ししますので、決められた時間にお越しください。
- ・検査実施後、各自で検査キットをお持ちのうえ、結果が出るまで「待機場所」にてお待ちください。自家用車でお越しの方は車での待機も可とします。
- ・検査結果が表示されたら「検査結果確認場所」まで起こしてください。連盟の担当者が1人ずつ結果を確認致します。
- ・検査で出たゴミは各自お持ち帰りください。
- ・各場所では周囲の人との距離を十分に保ってください。
- ・プライバシーの保護には出来る限り配慮するよう努めますが、「待機場所」や「結果確認場所」は共用であることをご理解ください。

2. 検査方法

- ①検査前に本品の使用環境を室温(15°C-30°C)にしてください。飲食・歯磨き・うがい直後を避け30分以上経過してから検査してください。検査時は唾液コレクターの先端にあるカバーを外します。
- ②口内の唾液を飲み込み、舌を突き出し舌の上の喉奥の方をコレクターで拭きます。
- ③唾液コレクターの先端を舌下に挿入し、しっかり唾液をしみこませてください。約2分程度が目安です。
- ④水平な場所に置いた抽出バッファを片手で支え、唾液コレクターの波線の図柄部分が抽出バッファに格納されるまで垂直に強く押し込みます。体重をかけてねじり入れるのも有効です。
- ⑤色つきのラインが表示されるまで待ちます。約15分以内に結果が判定できます。20分を超えての検査結果は全て無効です。

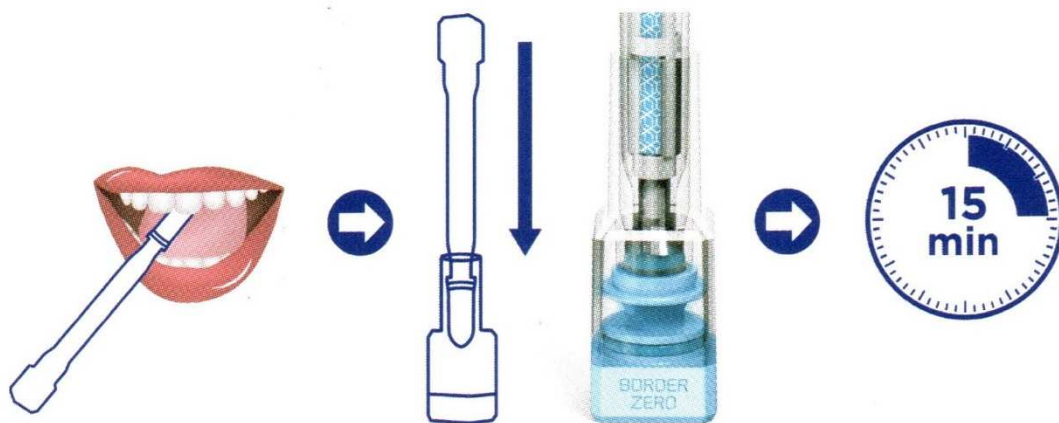


口の中をコレクターで拭い、しっかり唾液をしみこませてください。約2分程度が目安です。

幾何学模様が抽出バッファに入るまで強く押し込んでください。

約15分間色つきのラインが表示されるまで待ちます。

【検査結果表示】

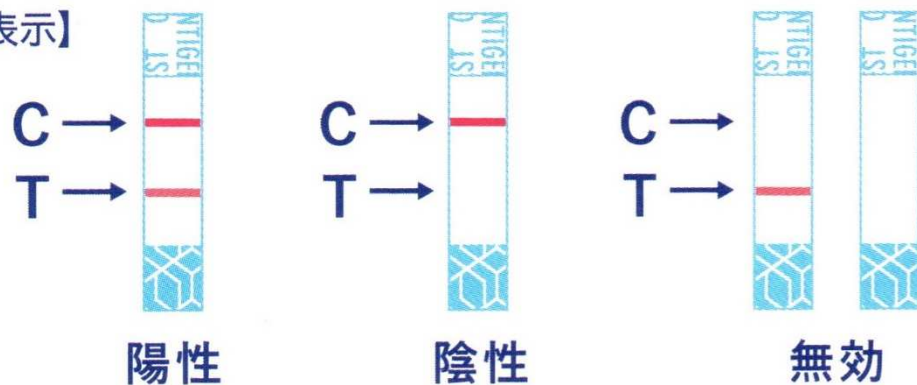

- ・検査はご自身で実施していただきます(実施方法の説明やサポートは担当者が実施致します)。
- ・飲食・歯磨き・うがい実施から30分以内は検査が実施出来ませんのでご注意ください。
- ・「陽性」と判定された場合、大会への参加は出来ません。検査キットの使用説明書に記載された連絡先もしくは各地域で指定された相談窓口(北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター等)にご連絡ください。

3. その他

検査の趣旨や実施方法等にご理解いただけない場合は、特例として棄権（返金あり）を許可致します。棄権することを希望される方は、大会前日までにフィギュア委員長に書面（書式不問）でご連絡ください。